

SomnoGuard® AP 2

in der Schlafendoskopie

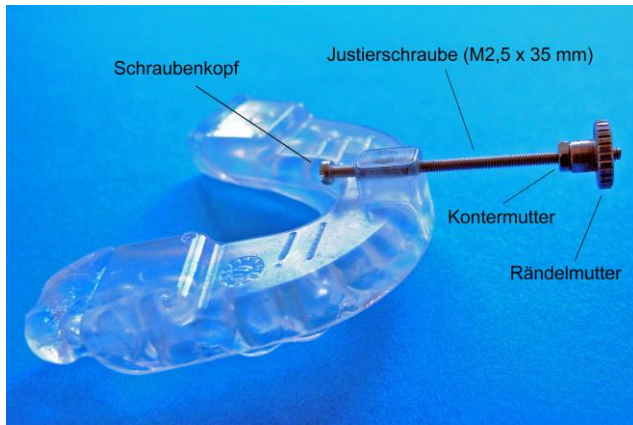


Abb. 1: Unterkieferschale



Abb. 2: Ober- und Unterkieferschale mit Justierschraube

Vorgehensweise:

- Anpassung von SomnoGuard® AP 2 gemäß der Gebrauchsanleitung und der Anschauungsmaterialien auf www.tomed.com
- Entfernen der Justierschraube (12 oder 16 mm) und Einschrauben der 35 mm langen Variante, die ausschließlich für die Schlaf-endoskopie vorgesehen ist
- Konfiguration in Abb. 1 beachten: keine Kontermutter vor dem Schraubenkopf, Position der Rändelmutter mit Kontermutter fixiert
- Vorerst Einstellung der Schraube entsprechend der natürlichen Kieferstellung des Patienten
- Zusammengefügte Schiene in den Mund des Patienten einsetzen
- Rändelmutter zur Vergrößerung oder Verkleinerung der Vorverlagerung des Unterkiefers vorsichtig drehen, um den Effekt einer Unterkiefer-Protrusionsschiene bei OSAS zu prüfen und die optimale therapeutische Einstellung zu finden
- Wichtig: Justierschraube nicht biegen