

Beschreibung:

Ein breites, elastisches Rückenband stützt den Rücken- und Lendenwirbelbereich. Mit einem justierbaren Klettverschluss wird die im Bauchbereich schmalere Bandage im Bereich des Unterleibs verschlossen. So kann die flexible Bandage während der gesamten Schwangerschaft mitwachsen und an den Bauchumfang angepasst werden. Die im Rücken und an den Seiten angebrachten Zuelemente ermöglichen die individuelle Weitenregulierung und eine Anpassung entsprechend der eigenen Komfort- und Stabilitätsbedürfnisse. Die sechs im Rückenbereich eingenähten Kunststoffstäbe stabilisieren die aufrechte Körperposition, was zusätzlich zur Schmerzlinderung beiträgt. Das Material ist atmungsaktiv und daher sehr angenehm zu tragen.



Abb. 1: GraviBelt®

Anwendungsbereiche:

- Bei Becken- und Rückenschmerzen infolge Beckenring- und/ oder Iliosakralgelenklockerung
- Bei Ischiasschmerzen und ausstrahlenden Schmerzen in alle Körperregionen
- Bei Schmerzen im Symphysenbereich sowie post-partum auch bei Symphysenlockerung
- Empfohlen auch nachts zum Tragen während des Schlafs bei Schmerzen durch die physiologische Beckenringlockerung

Kontraindikationen:

Bei Hauterkrankungen empfehlen wir, Ihren Arzt zu befragen, ob Sie solche Bandagen verwenden können.



Abb. 2: Vorderansicht



Abb. 3: Rückansicht

Gebrauch:

Halten Sie GraviBelt® in Hüfthöhe hinter Ihren Körper. Der Klettverschluss befindet sich dabei auf der linken Körperseite. Führen Sie das breite, elastische Rückenband auf der rechten Körperseite unterhalb Ihres Bauches vorbei und verschließen Sie körpermittig die Enden der Bandage. Durch Einstellung der flexiblen, verstellbaren Klettbänder im Bauch- und seitlichen Beckenbereich können Sie die Spannung der Bandage individuell regulieren. Tragen Sie GraviBelt® über absorbierender Unterwäsche.

Achtung:

Das Klettband muss beim Tragen und Waschen direkt auf das Flauschband gesetzt werden. Platzieren Sie das Klettband nicht auf anderen Gewebeteilen, da dies das Ziehen von Fäden verursacht.

Größen: GraviBelt® ist standardmäßig verfügbar in den Größen 34 bis 50. Die Größen beziehen sich auf die Zeit vor der Schwangerschaft. Sondergrößen werden auf Wunsch und gegen einen Aufpreis von uns gefertigt.

Pflegehinweis: Nur schonende Handwäsche. Nicht bügeln. Keine Bleichmittel verwenden. Nicht im Wäschetrockner trocknen, sondern noch nass aufhängen und trocknen lassen.

Material: 40% Baumwolle, 40% Nylon, 20% Elasthan

GraviBelt® wird unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen in Deutschland hergestellt. Wir nutzen sorgfältig ausgewählte und schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex Standard 100.



Das Produkt entspricht allen Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG, die anwendbar sind.



Hersteller:

Tomed GmbH • Medizinische Produkte
Sperberweg 2 • 50858 Köln • Deutschland
Tel.: 0221 17067206 • Fax: 0221 17067207
E-Mail: info@tomed.com • www.tomed.com