

# SomnoCushion® Pro

Anti-Schnarch-Rucksack zur Verhinderung der Rückenlage im Schlaf bei Schnarchen und obstruktiver Schlafapnoe



## Gebrauchsanleitung

Stand: 15.12.2017

SomnoCushion® Pro verhindert, dass Sie im Schlaf auf dem Rücken liegen. Untersuchungen zeigen, dass bei Schlaf in Rückenlage die Anzahl der Atemaussetzer häufig doppelt so hoch ist wie in der Seitenlage. In der Literatur wird berichtet, dass bei Vermeidung der Rückenlage das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom häufig deutlich reduziert werden kann.

SomnoCushion® Pro wird nachts wie ein herkömmlicher Rucksack getragen. Individuelle Einstellmöglichkeiten der Riemenspannung im Bereich von Bauch und Schultern sowie das hochwertige gepolsterte Innenkissen sorgen für einen hohen Tragekomfort. Führen Sie das Innenkissen in die Rucksacktasche ein und verschließen Sie den Reißverschluss. Stellen Sie die Gurte des Rucksacks derart ein, dass SomnoCushion® Pro zentriert auf Ihrem Rücken möglichst eng und ohne Spiel anliegt. Fixieren Sie die Abdeck-lasche auf dem geschlossenen Bauchgurt, um ein Anhaften von Bettwäsche oder Bekleidung auf dem Klettband zu vermeiden.

Bei obstruktiver Schlafapnoe, bestehenden Herzerkrankungen oder erheblichem Übergewicht sollte die Benutzung von SomnoCushion® Pro nur unter fachärztlicher Kontrolle erfolgen.

### Sicherheitshinweis:

SomnoCushion® Pro darf bestimmungsgemäß nicht mit verletzter Haut in Berührung kommen.

### Pflegehinweis:

Bei Bedarf Rucksack mit einem feuchten Tuch reinigen. Zur Reinigung der Innenkissenhülle die Füllung entnehmen und per Hand bei 30-40° mit Color-Waschmittel reinigen. Hülle an der Luft trocknen und wieder befüllen.

### Material:

Rucksackhülle: Polyamid 420d PU-beschichtet

Kissen: Mikrofaserstoff, Polyesterwatte, Schaumstofflocken



Das Produkt entspricht allen Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG, die anwendbar sind.

 **Hersteller:**

Tomed GmbH • Medizinische Produkte  
Sperberweg 2 • 50858 Köln • Deutschland  
Tel.: 0221 17067206 • Fax: 0221 17067207  
E-Mail: [info@tomed.com](mailto:info@tomed.com) • [www.tomed.com](http://www.tomed.com)

Dokumentnummer: UII.SCP.1217.G.01